




**YOUR  
PROTECT  
MASK**

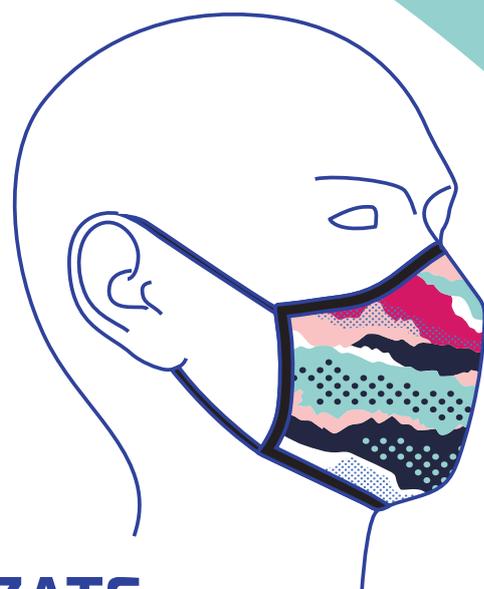


**MASCHERINE PERSONALIZZATE  
con PRESTAZIONI EQUIVALENTI al TIPO  $\text{FFR}$   
LAVABILI CON FILTRO SOSTITUIBILE**

Mascherine filtranti per uso individuale prodotte in accordo  
all' art. 16 comma 2 della Legge **n. 27** del **24 aprile 2020**

# DATI TECNICI

## Mascherina Protettiva Facciale

### CARATTERISTICHE

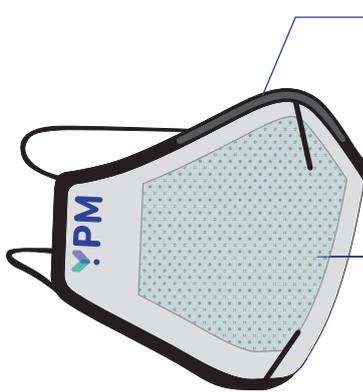

#### Parte strutturale



lavabile



tre strati di tessuto trattati

#### Filtro



sostituibile



triplo strato

#### Forma



Ergonomica, molto morbida a contatto con la pelle



Listello premi naso, per una miglior aderenza

### TIPOLOGIE TESSUTO

	MATERIALE	PESO	TRATTAMENTO
<b>ESTERNO e INTERNO</b>	Poliestere (PES)	125 gr/m <sup>2</sup>	<b>IDROREPELENTE</b> lavabile e riattivabile con stiratura
<b>INTERNO</b>	Poliestere (PES)	40 gr/m <sup>2</sup>	<b>ANTIBATTERICO</b> lavabile

Tutti i tessuti rispettano le certificazioni **OEKO-TEX STANDARD 100**

### TRATTAMENTI SUPERFICIALI DEI TESSUTI


	TRATTAMENTO
<b>ESTERNO e INTERNO</b>	<b>Eco Barrier di HeiQ</b> per garantire l'effetto anti-spray
<b>INTERNO</b>	<b>Sanitized SILVER</b> per sanificare il tessuto interno a contatto con il viso

### MATERIALE FILTRO:

FF70/310 PBT PB SMS

# MODALITÀ DI UTILIZZO

## Come INDOSSARE la mascherina

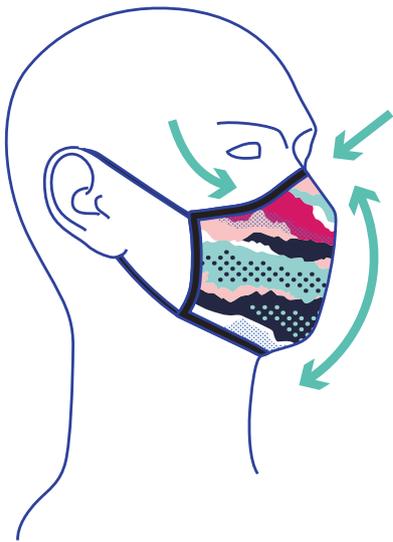

Indossare la mascherina avendo cura di **coprire bene naso e bocca** e non lasciare spazi sul contorno facciale.



È estremamente importante **non toccare la mascherina sul lato interno** (quello che andrà a contatto con il viso) **con mani non pulite** per non compromettere la sanificazione della stessa.

## Raccomandazioni per RIGENERAZIONE

**Estrarre il filtro usato e smaltirlo** secondo le norme di smaltimento in uso.

**Lavare** la mascherina a **max 40°**.

Non occorre igienizzare, il tessuto è protetto da **Sanitized SILVER**.

**Stirare obbligatoriamente dopo lavaggio a 110° max.** per riattivare trattamento idrorepellente. Non è necessario attendere che sia asciugata la mascherina.

**Consiglio:** *stirare con interposizione di un panno per salvaguardare i colori della stampa.*

**Inserire il nuovo filtro**, avendo accortezza di operare con mani pulite e disinfettate e non appoggiandosi a superfici non igienizzate.




La mascherina è lavabile e riutilizzabile almeno 30 volte.



**ATTENZIONE:**  
**NON STIRARE** la mascherina **CON il FILTRO INSERITO**. La mascherina ne verrebbe danneggiata e, probabilmente risulterebbe inservibile.


# MODALITÀ DI UTILIZZO

## Come RIMUOVERE un filtro usato

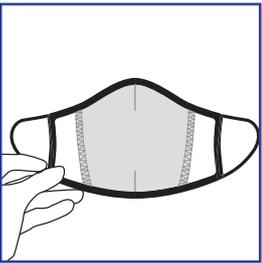

01

Dopo aver igienizzato le mani, posizionare la mascherina su un piano con l'interno rivolto verso l'alto.

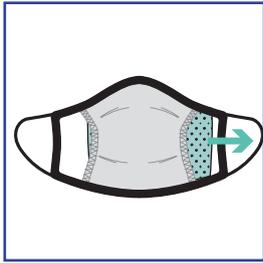

02

Per rimuovere il filtro usato è sufficiente estrarlo da uno dei due lati aperti della tasca interna. A questo punto la mascherina è pronta per essere lavata o per essere indossata nuovamente con un nuovo filtro.




### ATTENZIONE:

si consiglia di rimuovere il FILTRO ogni 8 ore di uso o giornalmente.




La mascherina viene fornita corredata di un filtro. **Prima dell'utilizzo inserire il filtro come sotto indicato.**

## Come INSERIRE un filtro nuovo

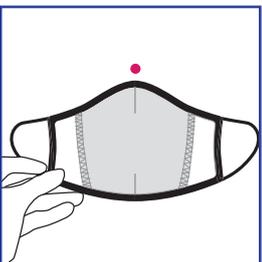


01

Dopo aver igienizzato le mani, posizionare la mascherina su un piano con l'interno rivolto verso l'alto. Il bordo nero più rigido ●, contenente il listello premi naso, deve rimanere sopra.

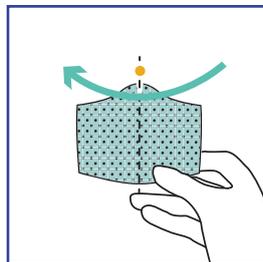


02

Prendere un filtro nuovo, mai utilizzato. Piegarlo a metà in modo simmetrico, mantenendo il taglio ● rivolto verso l'alto.

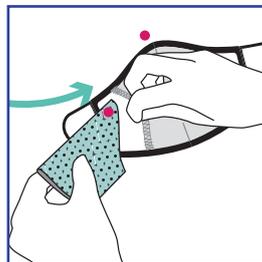


03

Inserire il filtro all'interno della tasca e aggiustarne la posizione con piccole rotazioni, in modo che i punti ● mostrati in figura coincidano.

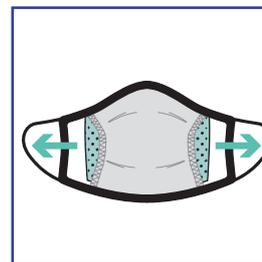

04


Aprire il filtro e tirare verso l'esterno i due lembi laterali.

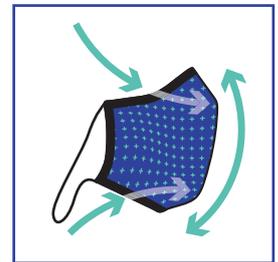

05

Far aderire il filtro alla mascherina esercitando una pressione dall'interno verso l'esterno. Quando la parte strutturale raggiunge la caratteristica forma semirigida, la mascherina è pronta per l'utilizzo.

# RIFERIMENTI NORMATIVI / PRESTAZIONI

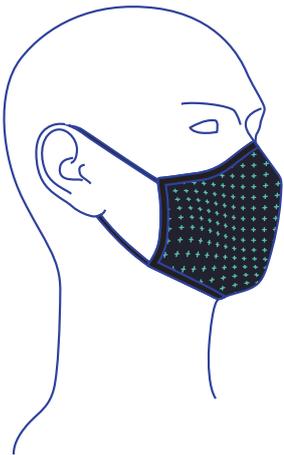

## Mascherina prodotta con Poliestere trattato. Caratteristiche:

*BFE (Capacità Filtrante)*  $\geq 98\%$  (Tipo **IR**)

*Pressione Differenziale*  $< 60 \text{ Pa/cm}^2$

*Bioburden (Pulizia Microbica)*  $\leq 30 \text{ ufc/g}$

*Resistenza agli spruzzi*  $\leq 16.0 \text{ kPa}$

## Prestazioni equivalenti

*Mascherina Tipo **IR***

## ATTENZIONE: Indumento Mascherina

- ◆ **Non** è un **DPI**
- ◆ **Non** è un **DM**
- ◆ **Non** può essere utilizzato in **ambiente ospedaliero**

La mascherina è conforme alle normative  
**EN 14683 e ISO 10993.**

# CUSTOMIZATION

- ✓ **3 taglie disponibili** (uomo, donna, bambino)
- ✓ **infinite possibilità di personalizzazione**  
(marchi e pattern aziendali, fantasie astratte, illustrazioni, tinte piene e sfumature.)



**SMALL** / *BAMBINO*



**MEDIUM** / *DONNA*



**LARGE** / *UOMO*

Realizza le tue mascherine.  
**Personalizza subito il tuo lotto.**

Idea Ricamo S.r.l.  
Strada del Francese 117/11  
10156 Torino  
tel. (+39) 011 4501490 - 011 4503059  
P.IVA e CF 09241460014  
[www.idearicamo.it](http://www.idearicamo.it)  
[info@idearicamo.it](mailto:info@idearicamo.it)

